

リスクマネジメント【看護サポート用品(ミトン型手袋)】

セーフミトン® III

自傷行為や抜管行為から身体を守ります。



- ・アイデアホック部分のパーツ(アイデアホック付ストッパー)は、取り外し可能で、交換用に単体販売も行っています。
- ・ホックが破損した場合でもパーツ交換で対応できます。



フリー(1双入)



アイデアホック付ストッパー

- ・取り外し可能
- ・交換用に単体販売あり
- ・「フリー」/「小児用」共通パーツ

※小児用は指の間仕切りがありません。



小児用(1双入)



利用者本人や介助者などの生命又は身体が危険にさらされる場合のみご使用ください。

“セーフミトン。III”は、自傷行為や抜管行為等を防ぐ事を目的に開発された手袋です。ミトンの中で手が回りにくく、パッドの効果により物が掴みにくい構造、そしてご本人では外しにくいアイデアホックを採用することにより、これらの行為に対応します。

ご使用の際は、ご家族や専門家とご相談の上、正しくお使いください。
ご使用者の症状や状況に応じ、適宜安全をご確認の上、適切なケアをお願いいたします。

特長

※「小児用」は仕切りがありません。

つかめない 2層構造の패드と、手袋内部で手が回転しにくい商品設計(親指と小指部分の仕切り)により、物がつかみにくくなっています。

内側:緩衝材(手の保護)としての効果とつかみにくさを高めた厚みです。
外側:物をつかもうとした際に、内側パッドにかかった力を分散します。

高い視認性

手の甲側はメッシュ素材となっており、手袋を外すことなく手の状態を確認できます。

快適装着

手の甲側のメッシュと2層構造のパッドは通気性が高く、ムレにくくなっています。さらに本体生地には吸収性の高い綿素材を使用しているため、汗をかいても不快に感じにくく、快適な使用感が得られます。

外せない

手首のベルトは面ファスナー留めのため、使用者の手首に合わせて調節できます。さらに、固定用ベルトにアイデアホック付ストッパー(※)をかぶせて留めることで、使用者本人では手袋を外しにくい構造になっています。

手が動かせる

立体裁断のメッシュとパッドのクッション性により、手袋内部は余裕があり、手が動かせます。

ミトン本体との面ファスナー接着により取り外し可能で、交換用に単体販売も行っています。(※)

左右兼用

交換用パーツ



替えアイデアホック付ストッパー



アイデアホックが表から見えないブラインドストッパー



NEW

規格

・041056 (フリー): ケース単位... 6箱入
・041046 (小児用): ケース単位... 20箱入

商品番号	規格	販売単位	定価	JAN CODE
041056	フリー 1双入	1双	6,050円(税別) 5,500円(税別)	4958995410563
041046	小児用 1双入	1双	6,050円(税別) 5,500円(税別)	4958995410464


交換用パーツ ※フリー/小児用共通パーツです。

041057	替えアイデアホック付ストッパー	1個入	1個	825円(税別) 750円(税別)	4958995410570
041058	ブラインドストッパー	1個入	1個	825円(税別) 750円(税別)	4958995410587

装着方法

※「小児用」は仕切りがありません。

※本品は左右兼用です。

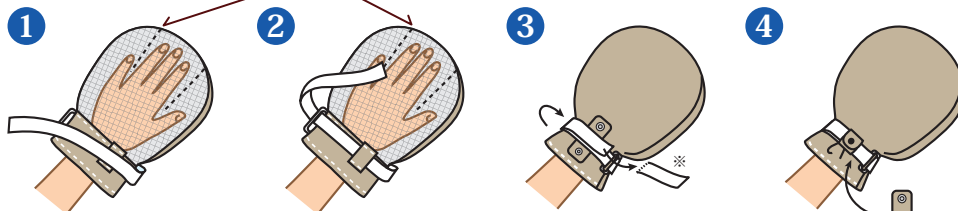

手袋に片手を挿入します。

- メッシュ側が手の甲側になるように装着します。
- 仕切り部分両端に親指、小指のみがくるように挿入します。
- 「小児用」は仕切りがありません。

固定用ベルトをベルト通しに入れ、プラスチックベルト通しに差し込みます。

逆方向に折り返し、しっかりと締め、面ファスナーで留めます。


※余分な面ファスナーは切って、長さを調節してください。

手のひら側のアイデアホック付ストッパーを留めます。

●ストッパーは取り外し可能です。

適応サイズ


規格	適応手首回り	適応手の長さ
フリー	13~20cm	14~19cm
小児用	9~14cm	~14cm

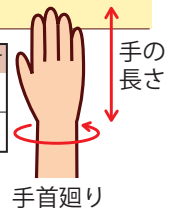

●「小児用」対象年齢目安 3歳~(手の小さな成人)

手首回り

注意

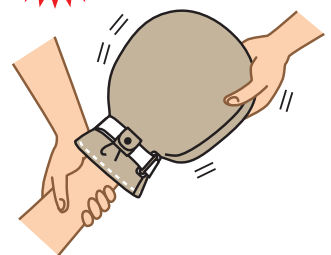

●装着後、手が手袋から簡単に抜けないことを確認してください。

洗濯上の注意

- アイデアホックおよび面ファスナーは必ず閉じた状態で洗濯してください。
- 水の温度は40℃を限度とし、洗濯用ネットに入れて洗濯してください。
- 塩素系の洗剤および漂白剤はご使用にならないでください。
- アイロン、ドライクリーニングの使用は避けてください。
- 日陰でつり干しをしてください。
- 高温・タンブラー乾燥は、製品変形・劣化のもとになりますのでおやめください。

素材

- 本体生地: 綿、ポリエステル
- メッシュ地: ポリエステル
- 芯材: ポリウレタン、ポリエステル
- ベルト: ナイロン
- 面ファスナー: ナイロン
- アイデアホック: ステンレス

発売元



株式会社 竹虎®

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【メディカル事業部】

東日本営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江城南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (7175) 7101

取扱店