



レスキュー Eバックシート 使用方法

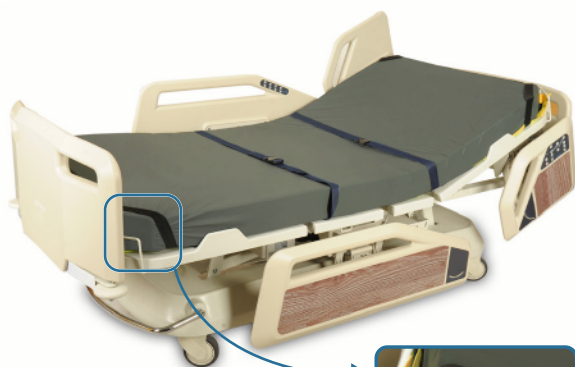

マットレスの四隅に
レスキューシートの
ベルトを掛けます



1. ストラップを被救護者にしっかり留めます。

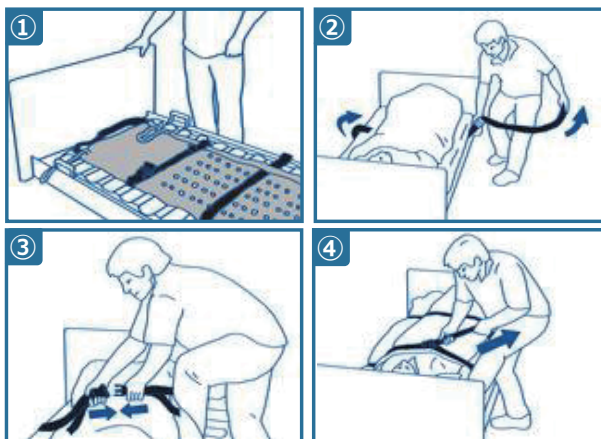

- ① 事前に「レスキュー Eバックシート」をベッド本体とマットレスの間に敷きます。
(ストラップは外し左右にまとめておきます)
- ② 避難時にはストラップを取り出し、被救護者を乗せたまま寝具ごと巻きつけます。
- ③ 被救護者が脱落しないようしっかり取りつけます。


2. 被救護者を床に移し、被救護者を引張ります。 安全のため、被救護者を引張る際は、救護者は背中をまっすぐにしてください。

シートの両端についた長いハンドルによって、救護者は無理のない姿勢でつかむことができ、被救護者を避難させている際に背中を痛めるリスクを軽減します。



ベッドの種類によっては、
マットレスを90度回転させ
被救護者を床に移します。

3. 避難中は床の上でも階段を下りる際も終始被救護者の足側を引張ってください。被救護者がケガをするリスクを最小にするためです。

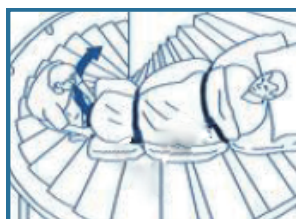

側面のハンドルはマットレスを持ち上げたり水平に動かす際に使用します。

